

Tillæg til fremstilling af stander til en-sidede PODD bøger

Der kan vælges at lave for og bagside med tyk laminering og samle bogen for herefter at sætte bølgeplast udenpå til fremstilling af stander

Materialer:

- Samlet PODD bog med for og bagside lamineret med tykkere laminering
- To stykker bølgeplast 21cm x bogens bredde, i det ene stykke (bagside) laves en lille revne ca. 2 cm fra underkant og 2 cm bred
- 5cm Velcro® med kroge og med klister-bagside.
- 50cm Velcro® med løkker (almindelig, ikke klisterbagside)
- Plastovertrukket stoftape
- Kniv (f.eks. Stanley kniv)




Tegn, og skær en lille revne ud på PODDbogens bagside.

Når der skal måles op, så sørg for at bølgeplasten ligger et par mm fra spiralen for oven



Sæt for og bagside på med dobbelklæbende tape


Påsætning af velcro med løkker

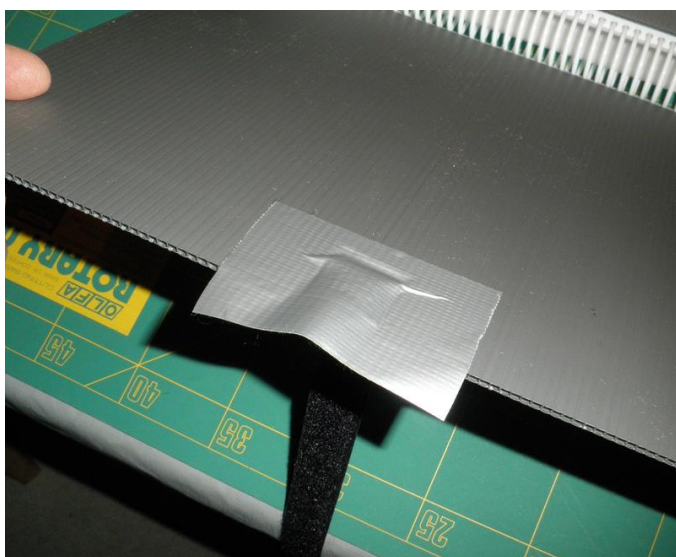

Tag det lange stykke velcro og stik det indefra ud gennem revnen, løkkerne skal vende nedad.

Bøj det ned på ydersiden, så det lige når til kanten.

Klip et stykke plastbeklædt lærredstape af og sæt hen over på forsiden og bøj det nogle cm rundt om kanten.

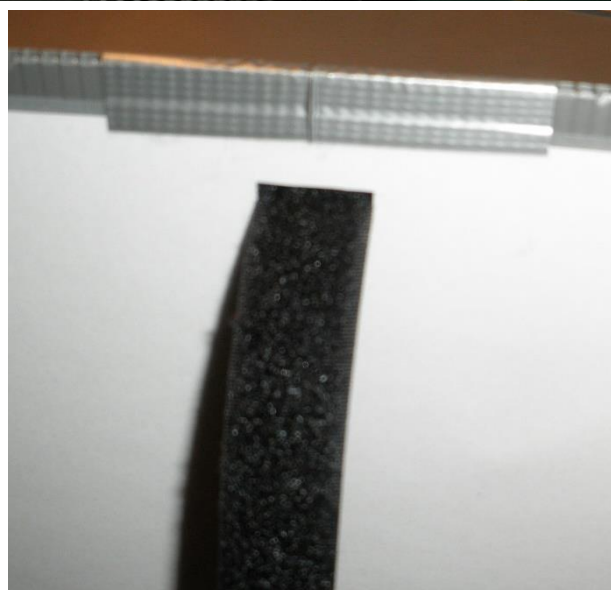

Herefter sættes et andet stykke tape på indersiden for at holde velcroen foldet ned.


Den side af velcroen, som ses på de 3 øverste billeder er siden med løkker.

Den side, der ses på det nederste billede er siden uden løkker.



Velcro med klisterbagside og kroge sættes rundt om den nederste kant på forsiden midt på.


Herefter ser bogen sådan ud når man lægger den fladt med omslaget opad

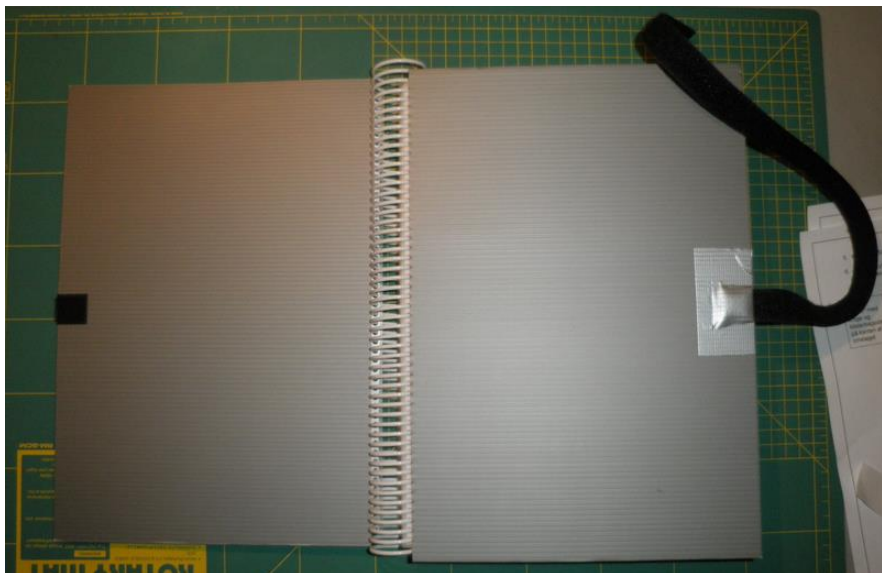

Fold nu for og bagside mod hinanden og gør den så skrå som det ønskes.

Velcrostrimlen fra bagsiden vil nu blive holdt fast af stykket med kroge på forsiden, og det er muligt at vinkle bogen, som det passer bedst i den enkelte situation.

Man kan sige at den oprindelige forside fungerer som bagside.

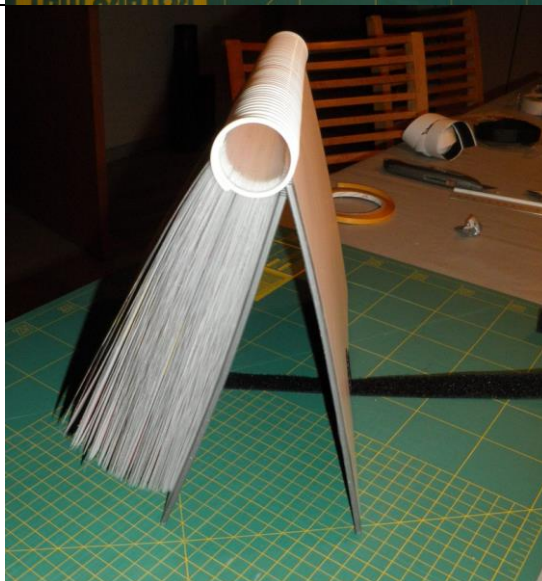


Tillæg for øjenudpegningsbog

På alle sider og omslag skal udkæres et hul, så man kan se igennem bogen og se personens øjne.
Øvrige samling følger ovenstående beskrivelse.



Når bogen står som en stander er der brug for et spejl på indersiden af bagsiden.
Udkær et stk. plasticspejl i min. 15x10cm.
Kant det med tape, så man ikke kan skære sig på det.

Sæt det på i kanten af hullet på indersiden af bagsideomslaget med velcrodupper.

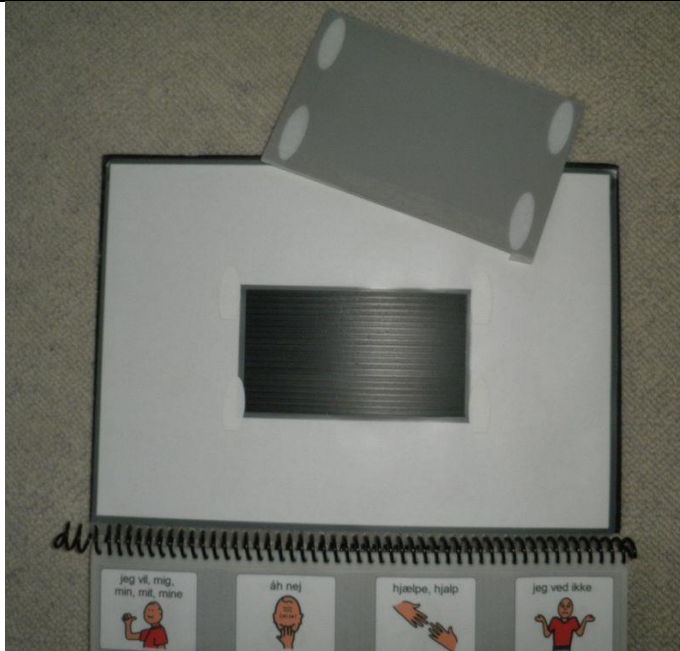

Klar til brug

